

COM-DEX UND COM-APP AN UNTERSCHIEDLICHE BLUETOOTH-STANDARDS ANPASSEN

Aktuell arbeiten Smartphones mit unterschiedlichen Bluetooth-Standards. Hier finden Sie einen Leitfaden, um unsere neue Wireless-Schnittstelle COM-Dex sowie die zugehörige COM-App ganz einfach an den jeweiligen Standard anzupassen.


Die Werkseinstellungen von COM-Dex und COM-App sind für den aktuellen Low-Energy-Bluetooth-Standard (**Blue Mode**) konfiguriert. Arbeitet das Smartphone mit einem älteren Bluetooth-Standard (**Green Mode**) muss dieser in COM-Dex und in der COM-App aktiviert werden.

Hinweis:

Alle Geräte und Anwendungen – Smartphone, COM-Dex und COM-App – müssen auf denselben Bluetooth-Standard eingestellt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.


1. So stellen Sie COM-Dex auf den **Green Mode** bzw. den **Blue Mode** um:

- Schalten Sie COM-Dex durch Öffnen der Neck-Loop-Antenne aus.
- Schließen Sie COM-Dex an die Stromversorgung an (mittels USB-Schnittstelle an den PC oder über das Netzteil).
- Drücken Sie beide Tasten am COM-Dex für ca. fünf Sekunden, bis die LED kurz **grün** oder **blau** aufleuchtet. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Farbe des gewünschten Modus aufleuchtet.
- Trennen Sie COM-Dex von der Stromversorgung. Schalten Sie COM-Dex durch Schließen der Neck-Loop-Antenne ein.

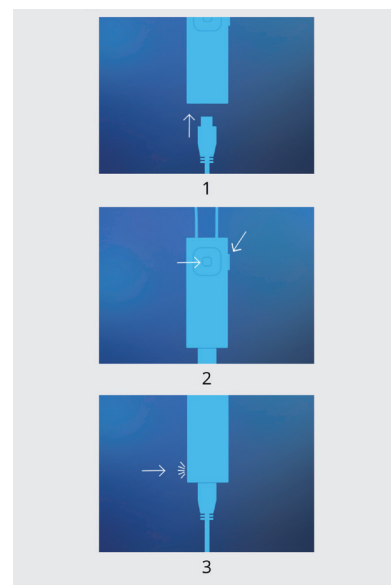


2. So stellen Sie die COM-App auf den **Green Mode** bzw. den **Blue Mode** um:

- Starten Sie die COM-App.
- Im Startbildschirm der App finden Sie den Schriftzug „Brauchen Sie Hilfe?“.
- Drücken und halten Sie diesen Schriftzug für ca. zehn Sekunden. Dieser leuchtet jetzt kurz **grün** oder **blau** auf. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Farbe des gewünschten Modus aufleuchtet.
- Die COM-App ist nun im gewünschten Modus.

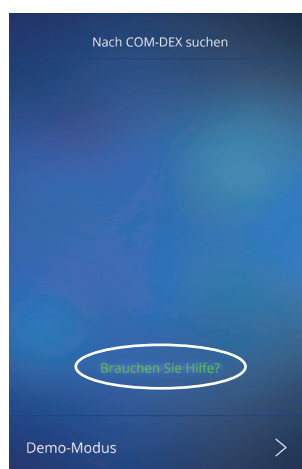

„Brauchen Sie Hilfe?“ grün

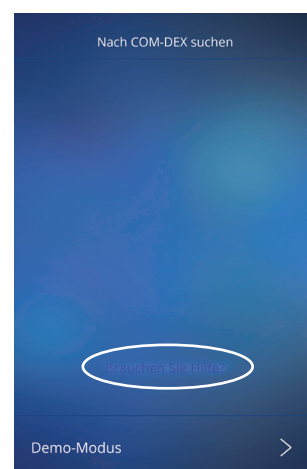

„Brauchen Sie Hilfe?“ blau